



## Wichtige HINWEISE zum Gebrauch



### Sehr wichtig: Vor dem ersten Tragen unbedingt waschen

Bevor die Masken verwendet werden, sollten sie aus Gründen des eigenen Gesundheitsschutzes unbedingt gewaschen werden.

Eine kurze Wäsche im Handwaschbecken genügt dazu nicht! Wir empfehlen, die Erst-Wäsche bei mind. 40°C als Maschinenwäsche vorzunehmen.

### Handhabung der Masken:

- auf richtige Platzierung achten, so dass Mund UND Nase bedeckt ist
- Maske absetzen und wechseln sobald sie durchfeuchtet ist
- vor oder nach Absetzen der Maske die Hände gründlich waschen oder mit Desinfektionsmittel reinigen
- **nach Nutzung** möglichst sofort waschen oder luftdicht in einem Beutel verschließen

